

DEPANNAGE

L'assistant sans fil Nucleus 5 (CR110) offre également à l'utilisateur un guide de dépannage intégré.




UN SEUL BOUTON POUR LE CONTROLE

Une pression sur le bouton « Cochlear » permet de contrôler l'état du processeur, le module de batterie, l'antenne et le câble d'antenne.



DETECTEUR D'ANTENNE INTEGRE

Le détecteur d'antenne intégré indique si l'antenne raccordée au processeur reçoit des signaux sonores du processeur. Il est possible d'appairer le dispositif à partir de cet écran.

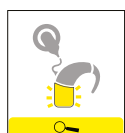

ALERTES

Les alarmes et avertissements personnels tels que « hors de portée », « batterie faible » ou « antenne déconnectée », ainsi que les modifications de réglage telles que « verrouillage et déverrouillage du contour d'oreille », « taux de mixage des accessoires » et « alarmes privées » peuvent tous être réglés sur l'assistant sans fil grâce aux instructions à suivre visibles sur l'écran.



DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Composant	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
Assistant sans fil Nucleus 5	110 mm	45 mm	12 mm	64 g

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Caractéristiques	Plage
Tension de fonctionnement de la batterie	3 V à 4,2 V
Tension de charge de la batterie	4,5 V à 5,5 V
Capacité de la batterie	680 mAh (batterie lithium-ion interne)
Fonctions des boutons-poussoirs	Démarrage et arrêt de l'assistant, activation et désactivation de la boucle à induction et de la boucle à induction automatique, et changement de programme.
Plage de transmission sans fil	Jusqu'à 2 m
Ecran	128 x 128 pixels, LCD couleur rétroéclairé 1,5 pouce

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

L'assistant sans fil Nucleus 5 est doté d'une batterie rechargeable inamovible. L'autonomie est d'une semaine en utilisation normale et la durée de chargement est comprise entre deux et quatre heures. La recharge de la batterie à l'aide de l'un des équipements suivants, disponibles chez Cochlear :

- Adaptateur secteur série CR100 et câble USB série CR100.
- Câble USB série CR100 connecté directement à un port USB.
- Chargeur de batteries série CP800 et câble USB série CR100. Le chargeur de batteries série CP800 vous permet de charger les batteries rechargeables de votre assistant sans fil et de votre processeur en même temps. L'adaptateur secteur série CP800 relie le chargeur de batteries série CP800 aux prises du secteur.

NUMERO DE SERIE

- L'assistant sans fil Nucleus 5 peut afficher son numéro de série ainsi que celui des processeurs associés.

MATERIAUX

- Le boîtier de l'assistant sans fil, et les boutons/touches non métalliques sont en polycarbonate.
- Le dos et les boutons/touches métalliques sont en acier inoxydable, plaqué chrome.