

Le jour de l'activation

La prochaine étape après l'intervention chirurgicale est l'activation. Au cours de ce rendez-vous, vous allez recevoir votre sac à dos contenant votre processeur Cochlear[™] Nucleus[®] 7 ainsi que ses différents accessoires. Voici les différentes étapes qui vous attendent :

1. Présentation du sac à dos Cochlear

Le jour de l'activation, un sac à dos vous sera remis.



Son contenu :

- Kit patient Nucleus[®] 7
- Étui de transport
- Kit Cochlear[™] Aqua+
- Déshumidificateur
- Kit de charge secteur

2. Kit patient Nucleus 7

Votre régleur vous présentera le kit patient qui comprend plusieurs éléments :



1^{er} plateau :

1. Unité de traitement Nucleus 7
2. Antenne
3. Batterie
4. Télécommande CR310



2^{ème} plateau :

1. Aimant
2. Compartiment à piles
3. Plaquette de piles
4. Protections microphones
5. Écouteurs
6. Chiffon microfibre
7. Tournevis/stylo
8. Clé USB
9. Capsule dessicante
10. Cornes d'oreille

3. Assemblage des différentes parties du processeur

Le régleur procédera avec vous à l'assemblage de votre processeur. Lors de l'activation, vos batteries ne seront pas chargées, vous repartirez alors avec le compartiment à piles.



4. Mise en place et connexion de votre processeur

Le régleur vous aidera à positionner votre processeur Nucleus 7 et il le connectera à son ordinateur via un câble de programmation spécifique ou par Bluetooth[®].



5. Début du premier réglage

La première séance de réglage peut démarrer.



6. Après le réglage, comment contrôler votre processeur ?

Application Nucleus Smart App

L'application mobile Nucleus Smart est disponible sur les appareils Apple et Android compatibles¹. Elle permet d'ajuster les réglages de base du processeur, de changer de programme, de suivre son temps d'exposition à la parole ou encore de localiser un processeur égaré.



Télécommande CR310

La télécommande CR310 vous permettra de régler les fonctions les plus courantes de votre processeur telles que la gestion de votre programme, le volume, la sensibilité ou encore la diffusion audio.



Descriptif des accessoires

Deux batteries rechargeables

Taille standard



Kit de charge secteur

Contient un chargeur en Y, un câble USB, un adaptateur et un jeu de prises internationales.



Antenne supplémentaire

Longueur équivalente ou différente de celle du kit processeur.



Écouteurs

Branchés sur le processeur, ils permettent à une personne entendante de vérifier le fonctionnement de vos microphones.



Cornes d'oreille

Taille identique à celle livrée. Lot de trois.



Protection microphones

Il est recommandé de changer vos protections microphones tous les trois mois. Lot de deux.



Accessoires divers

Chiffon en microfibre
Tournevis/stylelo



Clé USB

Il est important d'apporter cette clé USB à chacun de vos rendez-vous. Vos réglages y seront enregistrés.



Capsule dessiccante

À utiliser dans l'étui de transport.



Déshumidificateur

Pour garder votre processeur à l'abri de l'humidité, rangez-le chaque soir dans votre kit de déshumidification. Livré avec trois briques dessiccantes.



Aqua+

Le Cochlear Aqua+ est une protection étanche et réutilisable qui vous permet de garder votre processeur au sec lorsque vous êtes dans l'eau ou à proximité.



Étui de transport

Permet de transporter et protéger votre processeur et accessoires lors de vos déplacements.



Documentation

Vous trouverez dans votre sac à dos :

- un pack documentation comprenant les manuels utilisateurs du processeur Nucleus 7, des chargeurs, de la télécommande CR310 et de l'application Nucleus Smart App
- une brochure vous présentant la Cochlear Family

Plateforme d'aide en ligne

Pour être accompagné(e) dans la prise en main de votre processeur, scanner le QR code pour vous rendre sur la plateforme d'aide en ligne Cochlear.

