

Processeur Cochlear Nucleus® 8

Le jour de l'activation



Suite à votre intervention chirurgicale ou dans le cadre du renouvellement de votre processeur, vous allez recevoir un sac à dos contenant votre nouveau processeur Cochlear™ Nucleus® 8 ainsi que ses différents accessoires.

1. Présentation du sac à dos Cochlear

Le sac à dos qui vous est remis comprend le processeur, l'ensemble des accessoires et les modes d'emploi.



Son contenu :

- Kit processeur Nucleus 8
- Boîtier de rangement*
- Kit d'activité Aqua+
- Déshumidificateur*
- Kit d'alimentation secteur
- Kit pédiatrique enfant**

2. Composition du kit processeur Nucleus 8

Votre régleur vous présentera le kit processeur composé des éléments ci-dessous :



1^{er} plateau :

1. Unité de traitement Nucleus 8
2. Antennes
3. Batteries
4. Télécommande CR310*



2^{ème} plateau :

1. Aimant
2. Compartiment à piles
3. Plaquette de piles
4. Protections microphones
5. Écouteurs*
6. Chiffon microfibre
7. Tournevis/style
8. Clé USB
9. Capsule dessicante
10. Cornes d'oreille

3. Assemblage des différentes parties du processeur

Le régleur procédera avec vous à l'assemblage de votre processeur. Lors de l'activation, vos batteries ne seront pas complètement chargées. Vous repartirez avec le compartiment à piles ou une batterie que vous devrez recharger en rentrant chez vous.



4. Mise en place du processeur

Le régleur vous aidera à positionner votre processeur Nucleus 8 et pourra vous recommander des accessoires de maintien en fonction de votre quotidien et activités.



5. Connexion du processeur et premier réglage

Le régleur connectera le processeur à son ordinateur via un câble de programmation spécifique ou par Bluetooth®. Le réglage pourra alors démarrer.



6. Après le réglage, comment contrôler votre processeur ?

Application Nucleus Smart

L'application mobile Nucleus Smart est disponible sur les appareils Apple et Android™ compatibles¹. Elle permet d'ajuster les réglages de base du processeur, de changer de programme, de suivre son temps d'exposition à la parole ou encore de localiser un processeur égaré.



Télécommande CR310*

La télécommande CR310 vous permettra de régler les fonctions les plus courantes de votre processeur telles que le programme, le volume, la sensibilité ou encore la diffusion audio.



1. Pour plus d'informations sur la compatibilité, rendez-vous sur www.cochlear.com/apps/fr/sound-processor-and-app/compatibility.

* Dans le cadre de nos actions RSE, certains accessoires peuvent ne pas être fournis lors du renouvellement et faire l'objet d'un bon d'échange.

** Composé d'une corne d'oreille verrouillable, de stickers, caches de personnalisation et d'une peluche Koala.

Descriptif des accessoires fournis

Deux batteries rechargeables

Le kit processeur est livré avec deux batteries rechargeables de type Power.



Kit d'alimentation secteur

Il contient un chargeur en Y, un câble USB, un adaptateur et un jeu de prises internationales.



Antennes

Deux antennes de longueur différente sont fournies dans le kit.



Écouteurs*

Branchés sur le processeur, ils permettent à une personne entendante de vérifier le fonctionnement de vos microphones.



Cornes d'oreille

Un lot de trois cornes d'oreille est livré en complément de la corne déjà positionnée sur le processeur.



Protections microphones

Un lot de deux protections est livré en complément de la protection déjà positionnée sur le processeur.



Accessoires divers

Chiffon en microfibre pour nettoyer votre processeur.

Tournevis/stylo pour (dé)verrouiller le module de piles si nécessaire.



Clé USB

La clé USB livrée est destinée à enregistrer votre fichier de réglage. Il est important de l'avoir avec vous à chaque rendez-vous.



Capsule dessiccante

Fournies au nombre de quatre, les capsules dessiccantes sont à utiliser dans votre boîtier de rangement.



Déshumidificateur*

Il permet d'éliminer toute accumulation d'humidité et peut-être utilisé chaque soir. Ce dernier est livré avec trois briques dessiccantes.



Kit d'activité Aqua+

Cochlear Aqua+ est une protection étanche réutilisable qui vous permet de garder votre processeur au sec lorsque vous êtes dans l'eau ou à proximité.



Boîtier de rangement*

Il permet de transporter et protéger votre processeur et vos accessoires lors de vos déplacements.



Documentation

Vous trouverez dans votre sac à dos :

- un pack documentation comprenant les modes d'emploi du processeur Nucleus 8, des chargeurs, de la télécommande CR310 et de l'application Nucleus Smart
- une brochure vous présentant la Cochlear Family

Plateforme d'aide en ligne

Pour être accompagné(e) dans la prise en main de votre processeur, scannez le QR code pour vous rendre sur la plateforme d'aide en ligne Cochlear.



* Dans le cadre de nos actions RSE, certains accessoires peuvent ne pas être fournis lors du renouvellement et faire l'objet d'un bon d'échange.

Les dispositifs Nucleus sont fabriqués par Cochlear Ltd – Australie : Nucleus 8. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Fiches techniques et notices d'informations disponibles sur simple demande. Consultez votre professionnel de santé pour connaître les traitements possibles en matière de perte auditive. Les résultats peuvent varier et votre professionnel de santé pourra vous indiquer les facteurs susceptibles d'affecter ces résultats. Veuillez toujours consulter les instructions d'utilisation. Tous nos produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez contacter votre représentant Cochlear local pour plus d'informations sur les produits. Cochlear France SAS | 135 route de Saint Simon | CS 43574 | 31100 TOULOUSE – RCS 479 373 151 Toulouse. Spécifications nominales et précises au moment de l'impression, susceptibles d'être modifiées sans avertissement préalable. Photos non-contractuelles. Le processeur Nucleus 8 équipé de l'Aqua+ et du câble-antenne Aqua+ est étanche et dispose d'un indice de protection IP68 d'après la norme internationale CEI 60529 lorsqu'ils sont utilisés avec un module standard de batterie rechargeable Cochlear ou un module compact de batterie rechargeable Cochlear. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi correspondant. L'application Nucleus Smart de Cochlear est disponible sur l'App Store et sur Google Play. Le processeur Cochlear Nucleus 8 est compatible avec les appareils Apple et Android. Apple, le logo Apple sont des marques déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque d'Apple Inc, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Il est utilisé conformément aux conditions décrites dans la licence Creative Commons 3.0. Cochlear, Hear now. And always, Nucleus, Snugfit, le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited. © Cochlear Limited 2023. D2150264 V1-01 2023-11 French (France only).